


## 階段昇降機的主要故障の原因と処置【NRE9/NR09】

点灯表示:お客様で対処可能なエラー

点滅表示:お客様で対処が難しいエラー【販売店に連絡ください】

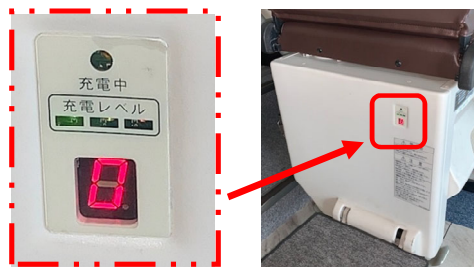

### 故障の原因と処置 (点灯表示【0】が正常です。)

NO	内容	原因	処置
1	点灯表示【1】で昇降動作が行えない。	椅子肘掛け【非常停止スイッチ】が押されている 安全装置が働いている	スイッチを時計方向へ回し、元に戻してください。
		椅子側面のキースイッチが【切】になっている 安全装置が働いている	キースイッチを【動】にしてください
2	点灯表示【2】で昇降動作が行えない。	リモコンスイッチ【停止スイッチ】が押されている 安全装置が働いている	【停止スイッチ】を再度押してください(標準レール仕様)
		呼戻しスイッチボックスキースイッチが【切】になっている 安全装置が働いている	キースイッチを差し込み【入】にしてください(折り畳みレール仕様)
		無線が途切れてしまった 安全装置が働いている	呼戻しスイッチのコンセントを入れてください(折り畳みレール仕様)
		折り畳みレールが上げられた状態、しっかりセットされていない 安全装置が働いている	折り畳みレールを正常な位置にセットする(折り畳みレール仕様)
3	点灯表示【3】で昇降動作が行えない。	椅子回転されている 安全装置が働いている	椅子を定位置に戻し、しっかりとロックを行う
4	点灯表示【5】で上昇動作が行えない。	フットレスト上階側障害物検知が作動 後部上階側樹脂カバー障害物検知が作動 安全装置が働いている	下降させ、障害物を除去
5	点灯表示【6】で下降動作が行えない。	フットレスト下階側障害物検知が作動 後部下階側樹脂カバー障害物検知が作動 安全装置が働いている	上昇させ、障害物を除去
6	点灯表示【7】で昇降動作が行えない。	本体下面フラップの害物検知が作動 安全装置が働いている	動作しない方向と逆方向に動作させ、障害物を除去
7	点灯表示【9】で昇降動作が行えない。	シートベルトが装着されていない(オプション仕様) 安全装置が働いている	シートベルトの装着を行う