


階段昇降機的主要故障の原因と処置【SEC】

点灯表示:お客様で対処可能なエラー

点滅表示:お客様で対処が難しいエラー【販売店様に連絡ください】

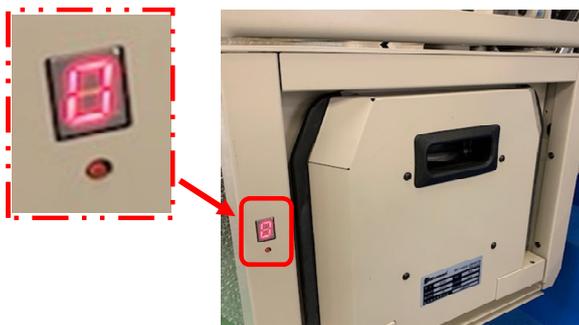

故障の原因と処置

(上限停止位置では点灯表示【7】、下限停止位置では点灯表示【9】これ以外の位置では点灯表示【0】が正常です。)

NO	内容	原因	処置
1	点灯表示【1】で昇降動作が行えない。 椅子側操作【リモコン式】	椅子側操作スイッチの【電源スイッチ】が押されている 安全装置が働いている	電源スイッチを1回押す
		椅子側操作スイッチの【カードキー】が抜けている 安全装置が働いている	カードキーを差し込む
	椅子側操作【肘掛け内蔵式】	椅子側キー-SWが【OFF】となっている 安全装置が働いている	キー-SWをONにする
		椅子側肘掛け非常停止SWが押されている 安全装置が働いている	非常停止SWを時計方向に回し解除
2	点灯表示【2】で昇降動作が行えない。	呼戻しSWの【電源スイッチ】がおされている 安全装置が働いている	1F、2Fどちらかの電源スイッチを1回押す
3	点灯表示【3】で昇降動作が行えない。	椅子回転されている 安全装置が働いている	椅子を定位置に戻し、しっかりとロックを行う
4	点灯表示【4】で下降動作が行えない。	フットレスト下階側障害物検知が作動 安全装置が働いている	上昇させ、障害物を除去
5	点灯表示【5】で上昇動作が行えない。	フットレスト上階側障害物検知が作動 安全装置が働いている	下降させ、障害物を除去
6	点灯表示【6】で昇降動作が行えない。	シートベルトが装着されていない(オプション仕様) 安全装置が働いている	シートベルトの装着を行う
7	点灯表示【7】で上昇動作が行えない。	上限フラップが検知(上限停止も同様) 安全装置が働いている	下降させ、障害物を除去
8	点灯表示【9】で下降動作が行えない。	下限フラップが検知(下限停止も同様) 安全装置が働いている	上昇させ、障害物を除去