

Bishamon®

スギヤス ワンダーランド



毎日を楽しむお手伝い
いす式階段昇降機
昇助くん

※カタログに記載されている製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

 **株式会社 スギヤス**

会社ホームページはこちら
<https://bishamon.co.jp/>



●ご注文・納期・価格のお問合せ先
本社営業部

✉ sales@bishamon.co.jp
☎ 0566-53-1126 0566-53-1844

●技術的なお問合せ先
カスタマーサポート

✉ support@bishamon.co.jp
☎ 0566-53-2281 0566-53-1617

本社 〒444-1394 愛知県高浜市本郷町4-3-21 TEL.0566-53-1126 FAX.0566-53-1844
東京 〒146-0083 東京都大田区千鳥2-2-12 TEL.03-3759-9722 FAX.03-3759-9723
大阪 〒537-0002 大阪府大阪市東成区深江南2-3-22 TEL.06-6747-7617 FAX.06-6747-7618

その他営業拠点 ホームページをご確認ください。

KSK-2601-2303②-2000-ADR

日本のど真ん中 愛知で作り続けて37年 累計販売台数 約25,500台

スギヤス ワンダーランド

Welcome!

Area Map

自動車整備
ワールド

物流機器
ワールド

環境機器
ワールド

住宅福祉機器ワールド

自動車整備用リフトとハンドリフトの
国内シェアNo.1
信頼と実績のブランドBishamonが
本気で作った福祉機器

型式適合認定

型式適合認定品とは、国土交通省が定めた安全基準に適合し、
個別の認定番号が付与されています。



街の **こんなところ** で役立っています




【集合住宅】



4階に住んでいます。足を悪くしてから、階段を使うのが辛くて外出しなくなっていました。階段昇降機を取付けた事で気軽に買い物に行ける様になりました。




【店舗】

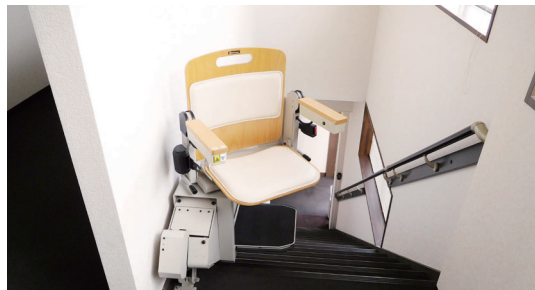

店舗部分と居住部分の間には階段があります。お店に毎日顔を出したい、車イス生活の母の為に階段昇降機を設置しました。笑顔で接客している母を見る事ができ、私も嬉しいです



【住宅】

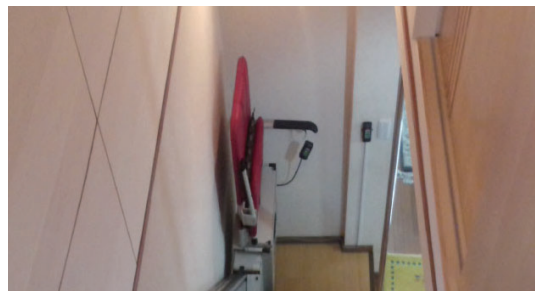

突然の交通事故、それ以来1階での生活になりました。階段昇降機を設置して10年ぶりに2階にある子供たちの部屋を掃除してあげる事が出来ました。



【寺社仏閣】



本堂まで急な階段があり、足の不自由な方はお参りし辛くなっていました。階段昇降機を設置したところ、観光客の皆様喜んで頂けました。



【船舶】



展望デッキには、階段を登らないと行けません。年に一度の花火大会を少しでも多くのお客様に観覧してもらえる様に、楽に使える階段昇降機を設置しました。



【住宅】



道から玄関まで15段の階段があります。デイサービスに通っていますが、送迎時階段の昇り降りが大変で設置しました。介助者さんも、楽になったと大喜びです。






どの機種を選んだら良いのかな？

ご自宅の階段の形状は？


直線

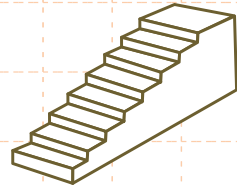

上から下までまっすぐ

昇助くんSEC P7~ 昇助くんSEO P13~

曲線

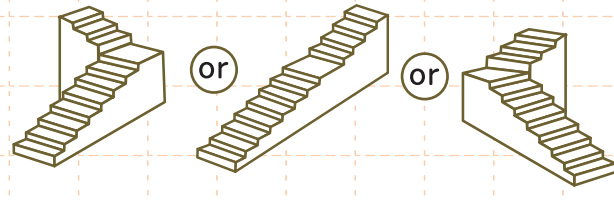

途中で曲がっている or 踊場が有る or 3階建て以上

昇助くんNRE P15~ 昇助くんNRO P17~




欲しい時はどうしたら良いのかな？

ご相談・お見積りからお引渡しまで

ご相談・お見積りからお引渡しまでの流れをご案内いたします。ご参考の上、まずは、お気軽にお問合せください。

¥0 お見積りまでは無料です。お気軽にお問い合わせください。

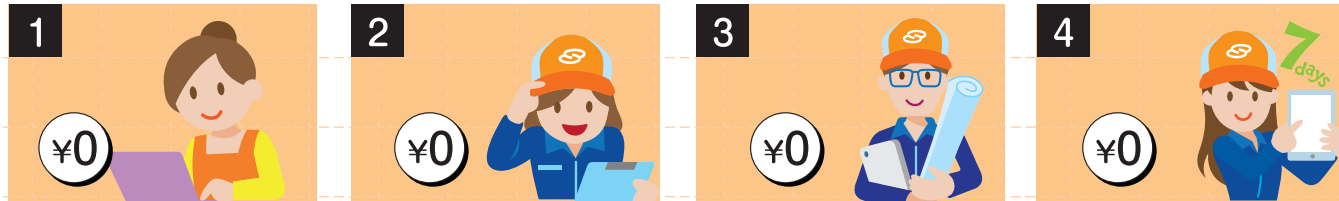

1 お見積りの依頼

お電話、またはホームページのお問合せページから見積り(無料)の依頼をしてください。

2 現地調査

販売店担当が現地調査日時を確認を行い、お約束の日時に現地調査に伺います。

3 レール設計

CADによるレールの設計を行います。

4 見積書の提出

現地調査後、おおよそ1週間で販売店担当者よりお見積書を提出します。



5 ご契約

ご契約が終わりましたら、いよいよ施工の準備に入ります。




6 製作

徹底した品質管理の下で、お客様専用の昇助くんを製作いたします。




7 取付工事

お約束の日に取り付工事を行います。特別な場合を除き1日で工事が完了いたします。

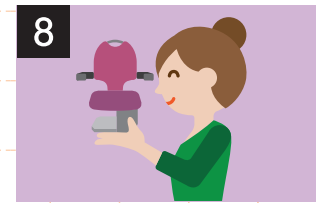

8 お引渡し

一年間の保証をお付けしております。また保守メンテナンス契約のご加入をお勧めしています。

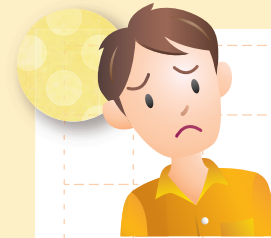

試乗できる場所はありますか？

関東地区



東京支店

〒146-0083
東京都大田区千鳥2-2-12
TEL.03-3759-9722

中部地区



西尾工場


〒445-0004
愛知県西尾市西浅井町二川崎47-4
TEL.0563-52-2221

関西地区



大阪支店


〒537-0002
大阪府大阪市東成区深江南2-3-22
TEL.06-6747-7617

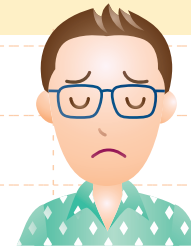

どこに問い合わせたら良いのかな？

お問い合わせ

株式会社 **スギヤス** 会社ホームページはこちら → <http://www.bishamon.co.jp/>

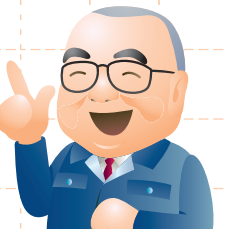

[業務グループ] E-mail:sales@bishamon.co.jp

TEL.0566-53-1126

〒444-1394 本社 愛知県高浜市本郷町四丁目3番地21 TEL.0566-53-1126 FAX.0566-53-1844
〒146-0083 東京 東京都大田区千鳥2丁目2番12号 TEL.03-3759-9722 FAX.03-3759-9723
〒537-0002 大阪 大阪府大阪市東成区深江南2丁目3番22号 TEL.06-6747-7617 FAX.06-6747-7618
[その他営業拠点] 仙台・前橋・広島・坂出・福岡


定期点検制度について より安全に、末長くご使用いただけるよう専門技術者による定期的な点検を受けていただくことをお勧めします。詳しくは、お求めの販売店へご相談ください。

※サビは保証の対象外とさせていただきます。※本製品は寒冷地仕様になっておりません。
●カタログに記載されている製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読の上、正しくご使用ください。

昇助くん 直線階段タイプ SEC9

(ナイロンカバー)

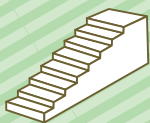

[直線タイプの価格帯]



型式適合認定品

※P1参照




ナイロン生地のカバーは
取り外して丸ごと洗えます

シートカラー: ● ベージュ (標準) ● ブルー ● オレンジ

ゆっくりスタート ゆっくりストップ

操作ボタンを押すとゆっくり動き始め、操作ボタンを離すとゆっくり止まります。

コンパクト収納

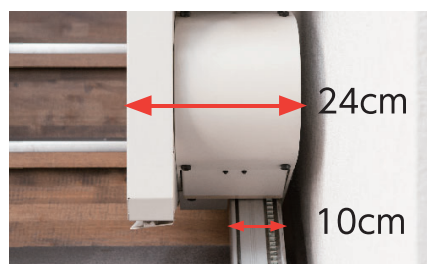

※ 壁からのレール設置寸法、収納寸法は共に最薄。

簡単操作



操作スイッチ

- ・有線式リモコンスイッチ
- ・押し続けている時だけ動く安全設計
- ・スイッチの取付は左右どちらも設定可能



呼び送りスイッチ

椅子の呼び送りを行ないます。

非常停止スイッチ

非常時の停止ボタン



誤操作防止

カード式キースイッチ

カードを引き抜く事で機械を動かさない様にする事ができます。

状態表示機能



製品の状態を番号でお知らせします。

座面回転

[昇降時]



[55度回転時]



[90度回転時]



上階側で安全に乗り降りができる様に座面を回転させる事ができます。
(写真はSEC9SH)

安心停止機能

イスにはさまざまなセンサーが取付けられ、衝突によるケガや故障を防ぐために、万一の場合は機械停止する様に設定されています。

シートベルト



固定式シートベルト(調節可能式)を使用しています。

追加仕様

レールが廊下にはみ出さないように設置したい。

折りたたみレール仕様に機能を追加します。




肘掛けが丸状のため、立ち上がり力が入らないから広くしたい。

幅広の肘掛けに変更することができます。



設置できない階段の種類

- 強度が低い階段
- 階段の踏み面凸凹した階段
- 踏み面の広さがバラバラ

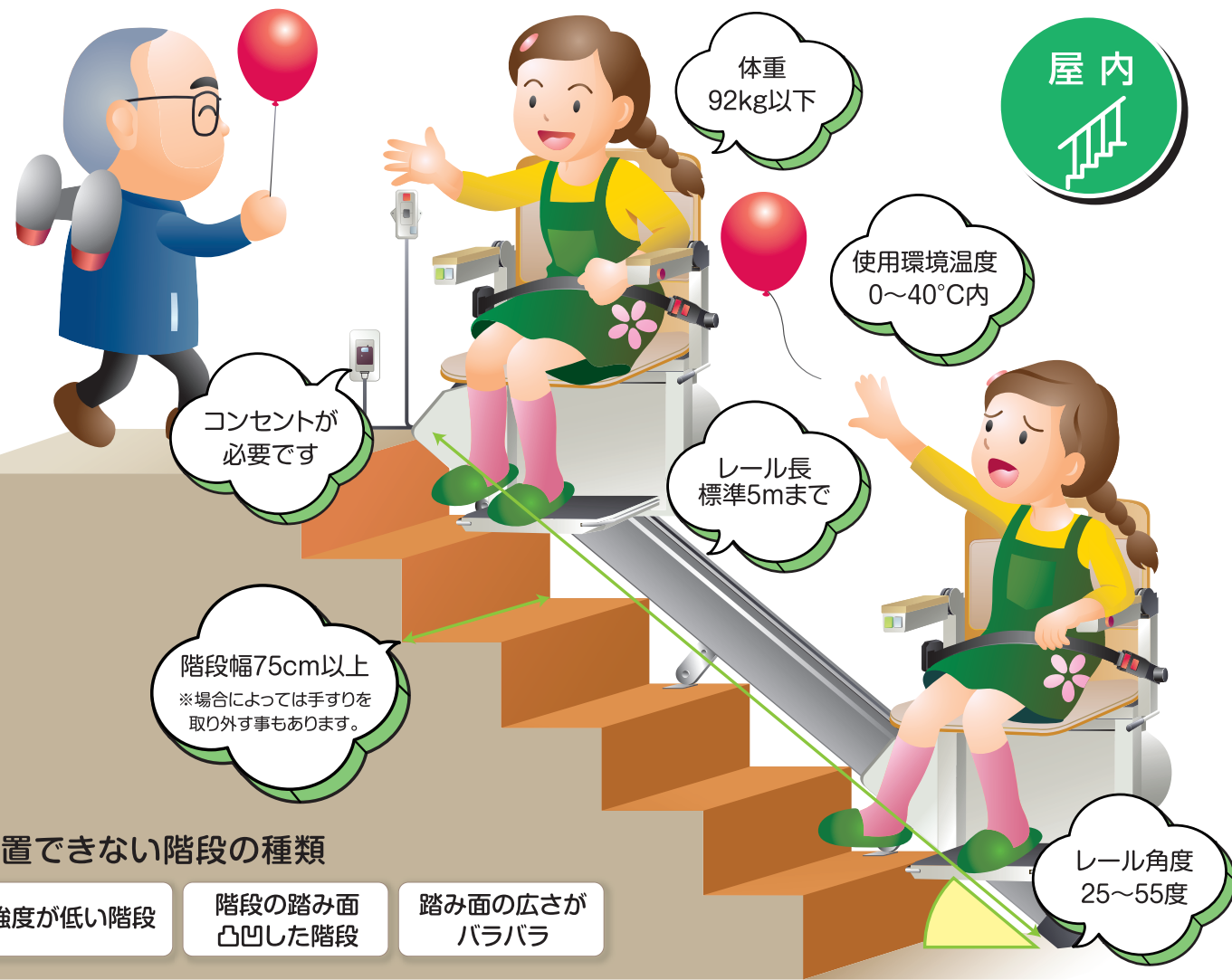

標準5mのレールでは短いため長くしたい。

総距離10mまで延長させることができます。



事前に図面や取扱説明書を見てみたい。

こちらのQRコードよりご覧いただくことができます。



その他にも
・音声案内
・ロング足載せ台
・足ベルト
・足のせ台折りたたみレバー等
さまざまな追加仕様をご用意しておりますので、詳しくは弊社までご連絡ください。



昇助くん 直線階段タイプ SEC9K (人工皮革カバー)




型式適合認定品 ※P1参照



ゆっくりスタート ゆっくりストップ

操作ボタンを押すとゆっくり動き始め、操作ボタンを離すとゆっくり止まります。

コンパクト収納

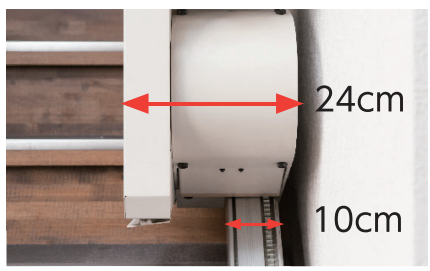

※ 壁からのレール設置寸法、収納寸法は共に最薄。

簡単操作

操作スイッチ

- ・有線式リモコンスイッチ
- ・押し続けている時だけ動く安全設計
- ・スイッチの取付は左右どちらも設定可能

呼び送りスイッチ

椅子の呼び送りを行ないます。

非常停止スイッチ

非常時の停止ボタン

誤操作防止

カード式キースイッチ

カードを引き抜く事で機械を動かない様にすることができます。

設置条件

- 屋内
- 体重 92kg以下
- 使用環境温度 0~40°C内
- コンセントが必要です
- 階段幅75cm以上 ※場合によっては手すりを取り外す事もあります。
- レール長 標準5mまで
- レール角度 25~55度

設置できない階段の種類

- 強度が低い階段
- 階段の踏み面 凸凹した階段
- 踏み面の広さがバラバラ

状態表示機能

製品の状態を番号でお知らせします。

座面回転

[昇降時]

[55度回転時]

[90度回転時]

上階側で安全に乗り降り出来る様に座面を回転させる事ができます。
(写真はSEC9SH)

安心停止機能

イスにはさまざまなセンサーが取付けられ、衝突によるケガや故障を防ぐために、万一の場合は機械停止する様に設定されています。

シートベルト

固定式シートベルト(調節可能式)を使用しています。

追加仕様

レールが廊下にはみ出さないように設置したい。

折りたたみレール仕様に機能を追加します。

操作スイッチを肘掛けに固定させたい。

操作スイッチ 固定ベルト取付

標準5mのレールでは短いため長くしたい。

総距離10mまで延長させることができます。

事前に図面や取扱説明書を見てみたい。


こちらのQRコードよりご覧いただくことができます。

他にも

- ・音声案内
- ・ロング足載せ台
- ・足ベルト
- ・足のせ台折りたたみレバー等

さまざまな追加仕様をご用意しておりますので、詳しくは弊社までご連絡ください。

昇助くん 直線階段タイプ SEC9SH (木製イスタップ)

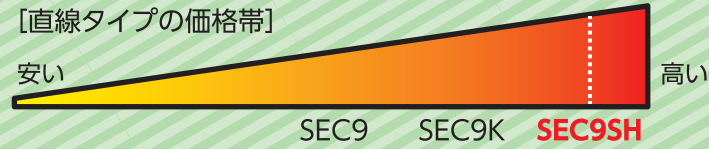

型式適合認定品

※P1参照




木目が暖かみをかもし出す
イスを木製にした家具調モデル

ゆっくりスタート ゆっくりストップ

操作ボタンを押すとゆっくり動き始め、操作ボタンを離すとゆっくり止まります。

コンパクト収納

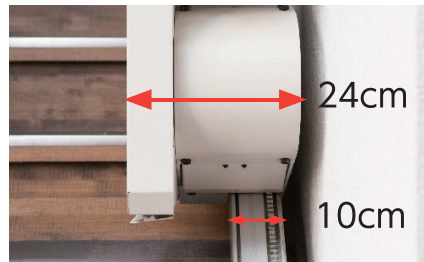

※ 壁からのレール設置寸法、収納寸法は共に最薄。

簡単操作



操作スイッチ

- ・肘掛け一帯の操作スイッチ
- ・押し続けている時だけ動く安全設計
- ・スイッチの取付は左右どちらも設定可能



呼び送りスイッチ

椅子の呼び送りを行ないます。

非常停止スイッチ

非常時の停止ボタン



誤操作防止



キースイッチ

鍵を引き抜く事で機械を動かない様にすることができます。

状態表示機能




製品の状態を番号でお知らせします。

座面回転

[昇降時]



[55度回転時]

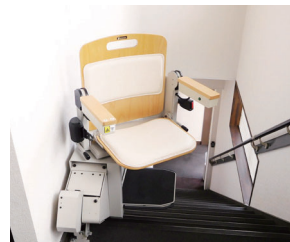

[90度回転時]



上階側で安全に乗り降りができる様に座面を回転させる事ができます。

安心停止機能

イスにはさまざまなセンサーが取付けられ、衝突によるケガや故障を防ぐために、万一の場合は機械停止する様に設定されています。

シートベルト



福祉機器用の巻き取り式シートベルトを使用しています。

追加仕様

レールが廊下にはみ出さないように設置したい。

折りたたみレール仕様に機能を追加します。



一人で操作する事が難しいので介助してあげたい。

有線式操作スイッチ

を取付けて、安全に操作していただけます。



標準5mのレールでは短いので長くしたい。

総距離10mまで延長させることができます。



事前に図面や取扱説明書を見てみたい。

こちらのQRコードよりご覧いただくことができます。



その他にも
・音声案内
・ロング足載せ台
・足ベルト
・足のせ台折りたたみレバー等
さまざまな追加仕様をご用意しておりますので、詳しくは弊社までご連絡ください。



体重 92kg以下

使用環境温度 0~40°C内

屋内

コンセントが必要です

階段幅75cm以上
※場合によっては手すりを取り外す事もあります。

レール長 標準5mまで


階段角度 25~55度

設置できない階段の種類

- 強度が低い階段
- 階段の踏み面 凸凹した階段
- 踏み面の広さがバラバラ

昇助くん 直線階段タイプ SEO9

(屋外用)

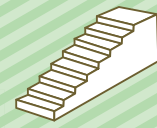

型式適合認定品

※P1参照




カバーカラー: ● ベージュ

屋外への設置可能タイプ

ゆっくりスタート ゆっくりストップ

操作ボタンを押すとゆっくり動き始め、操作ボタンを離すとゆっくり止まります。

コンパクト収納

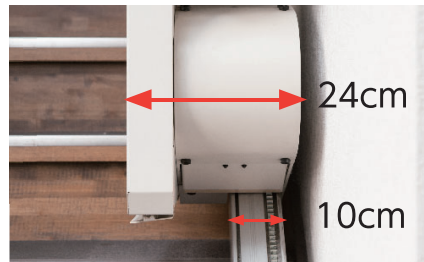

※ 壁からのレール設置寸法、収納寸法は共に最薄。

状態表示機能



製品の状態を番号でお知らせします。

座面回転


[昇降時]



[55度回転時]



[90度回転時]

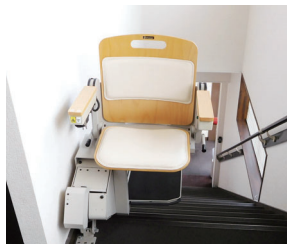

上階側で安全に乗り降りができる様に座面を回転させる事ができます。
(写真はSEC9SH)

安心停止機能

イスにはさまざまなセンサーが取付けられ、衝突によるケガや故障を防ぐために、万一の場合は機械停止する様に設定されています。

シートベルト



固定式シートベルト(調節可能式)を使用しています。

シートカバー (付属品)



追加仕様

レールが廊下にはみ出さないように設置したい。

折りたたみレール
仕様に機能を追加します。



一人で操作する事が難しいので介助してあげたい。

有線式操作スイッチ
を取付けて、安全に操作していただけます。



簡単操作



操作スイッチ

- ・有線リモコンスイッチ
- ・押し続けている時だけ動く安全設計
- ・スイッチの取付は左右どちらも設定可能



呼び送りスイッチ

椅子の呼び送りを行ないます。

非常停止スイッチ

非常時の停止ボタン

誤操作防止



カード式キースイッチ

カードを引き抜く事で機械を動かさない様にする事ができます。

設置条件

屋外

体重 92kg以下

使用環境温度 0~40°C内

コンセントが必要です

レール長 標準5mまで

階段幅75cm以上
※場合によっては手すりを取り外す事もあります。


レール角度 25~55度

設置できない階段の種類

- 強度が低い階段
- 階段の踏み面 凸凹した階段
- 踏み面の広さがバラバラ

昇助くん 曲線階段タイプ NRE9

(曲がり階段タイプ)

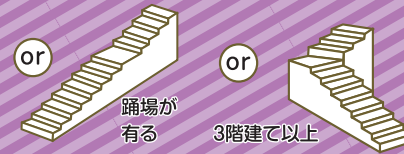

型式適合認定品

※P1参照



「どんな曲がりにも対応」
できる究極モデル

シートカラー: ● ブラウン ● キャメル

ゆっくりスタート ゆっくりストップ

操作ボタンを押すとゆっくり動き始め、操作ボタンを離すとゆっくり止まります。

充電式

充電式12Vバッテリーを2個使用しています。標準は充電1箇所です。

音声案内

音声による案内を行います。

簡単操作



操作スイッチ

- ・有線式リモコンスイッチ
- ・押し続けている時だけ動く安全設計
- ・スイッチの取付は左右どちらも設定可能



呼び送りスイッチ


充電式無線リモコンを使って椅子の呼び送りをを行います。(標準2個付属)

非常停止スイッチ

非常時の停止ボタン



誤操作防止

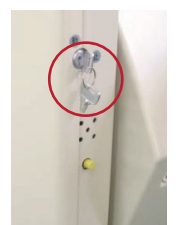

キースイッチ

鍵を引き抜く事で機械を動かない様にすることができます。

設置条件

コンセントが必要です
充電器用 1個
呼び送りスイッチ用 2個
充電器増設時は必要個数必要となります。
※コンセントの位置は階段周辺で無くても問題ありません。

体重 92kg以下

屋内

使用環境温度 0~40°C内

階段幅75cm以上
※場合によっては手すりを取り外す事もあります。

設置できない階段の種類

- 強度が低い階段
- 階段の踏み面 凸凹した階段
- 踏み面の広さがバラバラ

レール角度 0~53度

状態表示機能



バッテリーの残量と製品の状態をお知らせします。

座面回転


[昇降時]



[45度回転時]



[90度回転時]

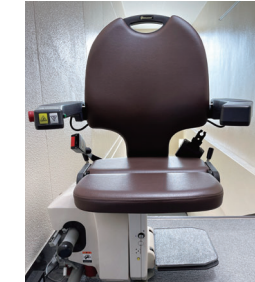

上階側で安全に乗り降り出来る様に座面を回転させる事ができます。

安心停止機能

イスにはさまざまなセンサーが取付けられ、衝突によるケガや故障を防ぐために、万一の場合は機械停止する様に設定されています。

シートベルト



固定式シートベルト(調節可能式)を使用しています。

追加仕様



一日の使用回数が多く
バッテリーの持ちに不安があります。

バッテリーを
4個に増設できます。

ただし、ご購入後の再改造はできません。



各階で充電できるように
して欲しい。


充電器を
追加できます。

ただし、ご購入後の再改造はできません。



事前に図面や
取扱説明書を見てみたい。



こちらのQRコードより
ご覧いただく
ことができます。

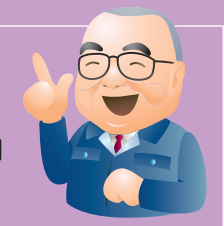

その他にも
・呼戻しスイッチ追加
・ロング足載せ台
・足ベルト
・足のせ台折りたたみレバー等
さまざまな追加仕様をご用意しておりますので、詳しくは弊社までご連絡ください。

昇助くん 曲線階段タイプ NR09

(屋外用曲がり階段タイプ)

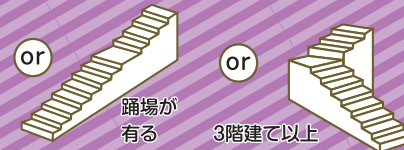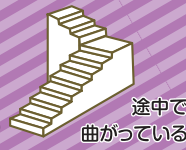

型式適合認定品

※P1参照



屋外への設置可能タイプ

シートカラー: ● ブラウン ● キャメル

ゆっくりスタート ゆっくりストップ

操作ボタンを押すとゆっくり動き始め、操作ボタンを離すとゆっくり止まります。

充電式

充電式12Vバッテリーを2個使用しています。標準は充電1箇所です。

音声案内

音声による案内を行います。

簡単操作



操作スイッチ

- ・有線式リモコンスイッチ
- ・押し続けている時だけ動く安全設計
- ・スイッチの取付は左右どちらも設定可能




呼び送りスイッチ


充電式無線リモコンを使って椅子の呼び送りをを行います。(標準2個付属)

非常停止スイッチ

非常時の停止ボタン

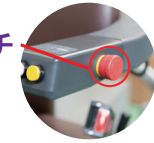

誤操作防止

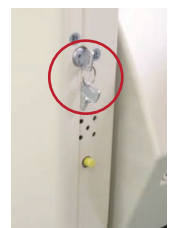

キースイッチ

鍵を引き抜く事で機械を動かない様にすることができます。

設置条件

コンセントが必要です
充電器用 1個
呼び送りスイッチ用 2個
充電器増設時は必要個数必要となります。
※コンセントの位置は階段周辺で無くても問題ありません。

体重 92kg以下

屋外

使用環境温度 0~40°C内

階段幅75cm以上
※場合によっては手すりを取り外す事もあります。

設置できない階段の種類

- 強度が低い階段
- 階段の踏み面 凸凹した階段
- 踏み面の広さがバラバラ

レール角度 0~53度


状態表示機能



バッテリーの残量と製品の状態をお知らせします。

座面回転

[昇降時]

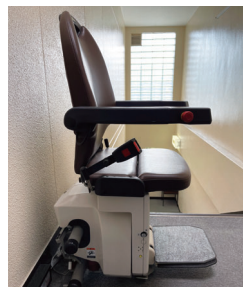

[45度回転時]



[90度回転時]



上階側で安全に乗り降りができる様に座面を回転させる事ができます。(写真はNRE9)

安心停止機能

イスにはさまざまなセンサーが取付けられ、衝突によるケガや故障を防ぐために、万一の場合は機械停止する様に設定されています。

シートベルト



固定式シートベルト(調節可能式)を使用しています。

シートカバー (付属品)



追加仕様

一日の使用回数が多く
バッテリーの持ちに不安があります。

バッテリーを 4個に増設できます。

ただし、ご購入後の再改造はできません。



各階で充電できるように
して欲しい。

充電器を 追加できます。

ただし、ご購入後の再改造はできません。



事前に図面や
取扱説明書を見てみたい。

こちらのQRコードより
ご覧いただく
ことができます。



その他にも
・呼戻しスイッチ追加
・ロング足載せ台
・足ベルト
・足のせ台折りたたみレバー等
さまざまな追加仕様をご用意しております
ので、詳しくは弊社までご連絡ください。

